

Bett easy up

STARKE PUNKTE

- Das EASY UP-Bett ermöglicht es Menschen, die Schwierigkeiten haben, in ihr Bett hinein- oder herauszukommen, dies sicher zu tun. Aufstehen oder Schlafengehen wird viel einfacher.
- Dank seiner 6 Motoren bietet es die Möglichkeit, in zahlreichen Positionen Ergonomie und Komfort gleichermaßen zu verbinden. Die verschiedenen Motoren werden mit einer einzigen Fernbedienung bedient, deren verständlichen Piktogramme die Bedienung erleichtern. Das Bett ist mit 4 Lenkrollen (Durchmesser je 10 cm) ausgerüstet, die jeweils mit einer Bremse ausgestattet sind, so dass das Bett bei Bedarf bewegt werden und gesichert werden kann.

Sven Oppel
in de Krümm 9
22880 Wedel
Telefon: 04103 9654104
Telefax: 04103-9654336
E-Mail: info@hmmso.de
Internet: www.pflegebetten-24.de



HMMSO
Pflegebetten-24.de



TECHNISCHE DATEN

- Maximales Benutzergewicht: 180 kg
- Gewicht des Bettes: 160 kg
- Abmessungen (ohne Matratze):
- Gesamtbreite des Bettes: 105 cm
- Gesamtlänge des Bettes: 220 cm
- Breite der Liegefläche: 90 cm
- Länge der Liegefläche: 200 cm
- Höhe der Liegefläche (vom Boden aus) –
Niedrigste Höhe: 50 cm – Höchste Höhe: 90 cm
Kopf- und Fußteilhöhe (vom Boden aus) –
Niedrigste Höhe: 90 cm –
Höchste Höhe: 130 cm
- Die Matratze besteht aus 3 Teilen: Hauptteil: 175 x 88 cm
(in 2 Teilen: 134x88 (Körper) + 38x88 cm (Beine))
- Fußteil 31,5 x 88 cm
- Entspricht der Norm: IEC60601-2-52

MATRATZE

Dieses Bett wird mit einer 14 cm dicken Matratze geliefert, die aus einer Standardschaumschicht von 7 cm und einer oberen Schicht aus Memory-Schaum besteht, sie bietet einen ausgezeichneten Komfort.

Durch Ausschnitte in der Matratze kann sie sich den verschiedenen Positionen des Bettes ohne Einschränkungen anpassen.


Auf den Matratzenbezug angenähte Gurte halten die Matratze während der verschiedenen Bewegungen sicher im Bett.

BETTWÄSCHE

Da sich das Bett dreht, empfehlen wir die Verwendung einer leicht zu bewegenden Bettdecke.



*Einfache Fernbedienung
mit logischen Symbolen
pro Taste.*

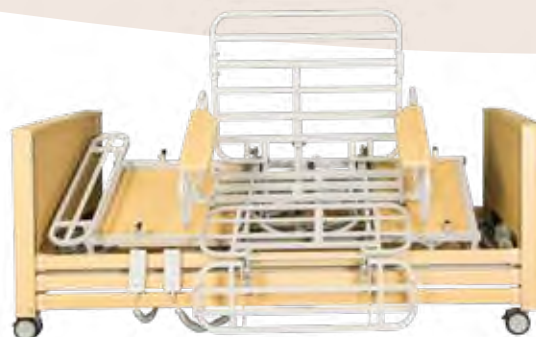

GRÖSSE




mit Bettverlängerung:
1,65m - 2,10m

max 180kg



SEITENTEILE

- Seitenteile mit Armlehnen: Zwei mit Holzarmlehnen ausgestattete Seitenteile sichern dem Nutzer eine gute Unterstützung beim Ein- und Aussteigen aus dem Bett. Diese Seitenteile schwenken mit dem Bett und neigen sich, wenn sich das Bett in der aufrechten Position befindet. Sie sind unabhängig voneinander und abnehmbar.
- Seitengitter (optional): Zwei verschiebbare Seitengitter in Holzoptik (aus Aluminium) sichern einen unruhigen Nutzer, der aus dem Bett fallen könnte. Beachten Sie, dass sie unbedingt abgesenkt sein müssen, wenn der Benutzer das Bett drehen möchte. Andernfalls wird das Bett beschädigt, diesbezügliche Reparaturen fallen nicht unter die Garantie.

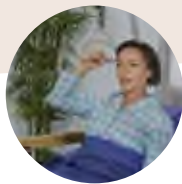

· *Bettgallgen (Aufrichter). Wird am Bettrahmen befestigt und ermöglicht es dem Benutzer, die Kraft seiner Arme zu nutzen, um sich im Bett zu positionieren.*



Das Bett ist mit gebremsten Leichtlauf-Rollen ausgestattet.

GARANTIEN

Auf die verschiedenen Teile des Bettes gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren. Auf die 6 Motoren gewähren wir eine Garantie von jeweils 3 Jahren. Diese Garantien gelten für den normalen Gebrauch mit Übereinstimmung gemäß Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung.

KLASSISCHE FUNKTIONEN

- **Rückenlehne:** Ein Motor treibt diesen Teil des Bettes an und ermöglicht es dem Benutzer, die Rückenlehne zum Lesen, eine Kleinigkeit zu Essen usw. anzuheben. Der maximale Winkel der Rückenlehne beträgt 70 °.
- **Beinstütze:** Ein Motor aktiviert die Beinstütze unter Berücksichtigung Ihres anatomischen Knieknicks.
- **Durch Anheben** der Beine wird die Durchblutung verbessert, während eine bequeme Position für die Beine beibehalten wird. Der maximale Winkel der angehobenen Beinstütze beträgt 30 °.
- **Variable Höhe:** Mit je einem Motor im Fussbereich und einen am Kopf des Bettes können Sie die Höhe des Bettes ändern. Die Höhe des Bettes (Höhe der Matratze eingeschlossen) kann von 64 bis 104 cm variiert werden, wodurch die Mobilisierung oder Handgriffe die an der bettlägerigen Person durchzuführen sind, den Rücken des Pflegepersonals schont.
- **Bitte beachten Sie,** dass das Bett vor dem Schwenken abgesenkt wird, um den Ausstieg aus dem Bett zu erleichtern.
- **Anti-Trendelenburg-Funktion:** In bestimmten Situationen muss der Benutzer möglicherweise das gesamte Bett (ebene Matratze) kippen, wobei der Oberkörper höher als die Beine liegt. Ein Knopf auf der Fernbedienung ermöglicht diese Neigung. Beachten Sie, dass die umgekehrte Position (Trendelenburg-Funktion) nicht möglich ist, um zu vermeiden, dass Ihr Kopf tiefer als der restliche Körper liegt (Die «Trendelenburg-Funktion» ist zu Hause aus Sicherheitsgründen ohne Aufsicht einer medizinischen Fachkraft nicht empfehlenswert).

BESONDERE FUNKTIONEN

- Drehung des Bettes: Ein Motor ermöglicht die Drehung des Bettrostes um 90 °.
- Das Bett wird auf die niedrigste Höhe abgesenkt.
- Die Rückenlehne und die Beinstütze sind jeweils erhöht.
- Das Bett dreht sich.
- Eine Taste auf der Fernbedienung synchronisiert diese drei Aktionen nacheinander. Beachten Sie, dass es möglich ist, die rechte oder Linenke Seite des Bettes zum Schwenken vorzuwählen. Bei der Montage des Bettes muss der Techniker zum Zeitpunkt der Installation informiert werden. Ein Sicherheitssystem verhindert, dass das Bett kippt, bis diese drei Vorgänge abgeschlossen sind. (Möglichkeit, das Bett auf die rechte oder Linenke Seite zu drehen, diese müssen bei der Installation angegeben werden).
- Aufstehfunktion: Der Funktion «Aufstehen» ist eine Taste zugeordnet, mit der der Sitzbereich wie bei einem Aufstehsessel («Kippmotor») an der definierten Seite nach aussen angekippt werden kann. Das Verlassen oder Einsteigen in das Bett ist mühelos, da sich der Benutzer nach Abschluss des Vorgangs in einer halb aufrechten Position befindet.

Bett Easy Up

Es ermöglicht Ihnen, aus dem Bett aufzustehen oder seitlich in einer sitzenden Position bequem ins Bett zu steigen. Ausgestattet mit 6 Motoren, die mit einer einzigen Fernbedienung gesteuert werden, wird das Ein- und Aussteigen aus dem Bett viel einfacher.

STARKE PUNKTE

- 2 unabhängige Motoren um den Oberkörper oder die Beine anzuheben. (mehrere Kombinationen für Ihren Komfort möglich).
- 2 Motoren arbeiten gleichzeitig (einer am Kopfteil, der andere am Fußteil des Bettes), sie erlauben eine Lift-Funktion, um die Höhe des Bettes einzustellen (variable Höhe von 64 bis 104 cm inklusive Matratze vom Boden aus).
- 1 «Pivot»-Motor zum Drehen nach aussen und Senken der Beine.
- 1 Motor zum Kippen nach aussen (auf einer Seite des Bettes) und für Sitz-/Gesäbbereich (Funktion Heber).
- Wird mit einer 12 cm dicken Matratze geliefert: Standardschaumschicht von 6 cm und einer oberen Schicht aus 6 cm Memory-Schaum besteht.
- Gurte zum Halten von Matratzen während der Bewegung.
- 2 mit Holz ausgestattete Armlehnen zum Abstützen der Arme in sitzender oder stehender Position.

Technische Daten siehe S.34



Preis, Stand 05.2022 6959 € inkl. Mwst und Aufbau, Montage im Haus!